

NOTE A L'ATTENTION DES CHIRURGIENS DENTISTES IMPLANTS et PROTHESES SUR IMPLANTS CLINICA DENTAL DANOS

⇒ 1 MARQUE ET TYPES IMPLANTS UTILISES

Les marques des implants utilisés sont toujours identifiées sur le document post opératoire remis au patient que celui-ci doit conserver.

- **MG OSSEOUS** (jusqu'en 2013) => connexion **HEX externe standard RP 4.1**
www.mozo-grau.com info@mozo-grau.com
- **EUROTEKNIKA** ou **ETK UNEVA +** => connexion **HEX externe standard RP 4.1**
www.etk.dental
- **EUROTEKNIKA** ou **ETK NATURACTIS NATURALL**=> connexion **INTERNE compatible ASTRA AQUA (ø 3.5/4.0/4.5)** www.etk.dental

⇒ 2 SYSTEMES PROTHETIQUES : PROTHESE FIXE

Le type de vis est indiqué sur la facture (ou sur le document de conformité prothétique) remise au patient et qui doit être conservée.

2-1 CONNEXION HEX EXTERNE RP diamètre 4.1 :

ATTENTION / Les vis sont toujours protégées par un composite SOFT (CLIP F VOCO) retirable aux ultra-sons (pointe parodontale droite).

Prothèse vissée

HEX 1.25 ou 1.20: couronnes ou bridges transvissés / serrage 35 N/cm

TPA*: prothèses **angulées** transvissées / serrage 25 N/cm

Prothèse scellée : ciment DENTOTEMP (GACD)

HEX 1.25 ou 1.20: PILIERS CLASSIQUES / serrage 35 N/cm

TPA*: PILIERS **angulés** / serrage 25 N/cm

HEX 1.25 : piliers MULTI UNIT serrage 15 N/cm

2-2 CONNEXION INTERNE compatible astra aqua (type vis voir facture)

ATTENTION / Les vis sont toujours protégées par un composite SOFT (CLIP F VOCO) retirable aux ultra sons (pointe parodontale droite) ou par du téflon . Par-dessus, un composite classique est réalisé dans le cas de transvissées.

sur rendez-vous ☎ 00.34. 943 61 38 58

clínica dental DANOS sl NIF:B20896254

Paseo de Colon 32, 1º Izda 20 301 IRUN ESPAGNE

www.dentaldanos.com dentaldanos@gmail.com

Prothèse vissée

HEX 1.27 : couronnes ou bridges transvissés / serrage 20 N/cm

TPA * : couronnes ou bridges angulées transvissés / serrage 20 N/ cm

Prothèse scellée : ciment DENTOTEMP (GACD)

HEX 1.27 : PILIERS / serrage 20 N/cm

TPA* : PILIERS **angulés** / serrage 20 N/cm

***NOTE IMPORTANTE** : les vis TPA (www.ipd2004.com) utilisées lors de prothèses angulées sur CONNEXION EXTERNE OU INTERNE ont été modifiées depuis avril 2018. Sur les factures des patients il est indiqué TPA new (tournevis gris). L'empreinte tournevis TPA correspond au tournevis doré (avant avril 2018). Les tournevis HEX 1.20 1.25 1.27 TPA peuvent être commandés sur internet (www.ipd2004.com).

2-3 CONNEXION INTERNE ETK NATURACTIS /NATURALL+ (type vis voir facture)

ATTENTION / Les vis sont toujours protégées par un composite SOFT (CLIP F VOCCO retirable aux ultra-sons pointe parodontale droite) ou du téflon. Par-dessus, un composite classique est réalisé dans le cas de transvissées.

Prothèse vissée

Tournevis ETK HEX : couronnes unitaires transvissées /serrage 25 N/cm

Prothèse scellée : ciment DENTOTEMP ou DENTOCEM (GACD)

Tournevis ETK HEX : PILIERS / serrage 25 N/cm

⇒ 3 SYSTEME PILAR LOCATOR : PROTHESE MOBILE

- **Serrage à l'aide de la clé spécifique pilar locator (COUPLE SERRAGE connexion HEX EXTERNE = 35 N/cm ; connexion interne = 25 N/cm)**
- **Code couleur bagues téflon (disponibles chez HENRY SCHEIN)**
 - **Divergence < 20 ° transparent (+++) rose (++) bleu (+)**
 - **Divergence > 20° vert (++) rouge (+)**

sur rendez-vous ☎ 00.34. 943 61 38 58

clínica dental DANOS sl NIF:B20896254

Paseo de Colon 32, 1º Izda 20 301 IRUN ESPAGNE

www.dentaldanos.com dentaldanos@gmail.com